

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
Fotelik rehabilitacyjny KONIK



CE

Instrukcja użytkowania i konserwacji

AKCESMED[®]



FOTELIK REHABILITACYJNY „KONIK” został zaprojektowany z myślą o dzieciach ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne siedzenie.

Zastosowanie drewna, kolorowej tapicerki, żywych kolorów, sympatycznej postaci konika sprawia, że dzieci przyjmują fotelik bardziej jak zabawkę niż sprzęt rehabilitacyjny.

Jest to urządzenie bardzo uniwersalne, można w nim sadzać dzieci bardzo wiotkie, jak i dzieci z problemami dużych napięć mięśniowych. Jego uniwersalność wynika z szerokiego zakresu regulacji, o którym piszemy w dalszej części.

Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiedziecie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi skontaktujcie się z doradcą medycznym naszej firmy (tel. 0508 382 509) lub bezpośrednio z AKCES-MED Sp. z o.o. (tel. 0-17 85 00 978).

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.

SPIS TREŚCI:

1. Przeznaczenie instrukcji.....	s. 3
2. Wskazania do stosowania fotelika KONIK	s. 3
3. Ogólna charakterystyka fotelika KONIK	s. 4
4. Specyfikacje techniczne fotelika KONIK	s. 4
5. Standardowe wyposażenie fotelika KONIK.....	s. 5
6. Środki bezpieczeństwa	s. 6
7. Podstawowe zasady dopasowania fotelika do użytkownika.....	s. 8
8. Konserwacja i czyszczenie fotelika KONIK	s. 12

1. Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego używania FOTELIKA „KONIK”, przygotowania urządzenia do pracy, sposoby konserwacji i czyszczenia oraz warunków gwarancji.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności z urządzeniem, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania i upewnić się, że wszystkie informacje, zalecenia i ostrzeżenia zawarte w instrukcji są w pełni zrozumiałe.

2. Wskazania do stosowania FOTELIKA „KONIK”

Badania kliniczne prowadzone z fotelikami potwierdzają wskazania stosowania tych urządzeń w leczeniu i zapobieganiu wielu schorzeń, a w szczególności:

- poprawy czynności układu sercowo-naczyniowego,
- zapobieganiu i leczeniu zastoju żylnych,
- poprawy wentylacji płuc i zapobieganiu zapalenia płuc,
- zapobieganiu zatorom tętnicy płucnej,
- zapobieganiu i leczeniu osteoporozy,
- zapobieganiu i leczeniu zastoju w układzie moczowym,
- poprawy perystaltyki jelit,
- pomocy w reedukacji pęcherza neurogennego,
- poprawy stanu psychicznego,
- zapobiegania zanikom mięśni,
- zapobieganiu i leczeniu przykurczów, poprawy ruchomości stawów.

Decyzję o zastosowaniu określonej formy rehabilitacji, w tym z zastosowaniem fotelika zawsze podejmuje lekarz prowadzący lub terapeuta.

3. Ogólna charakterystyka FOTELIKA „KONIK”

FOTELIK „KONIK” jest przeznaczony do czynnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Fotelik pozwala na samodzielne (ale pod nadzorem), bezpieczne siedzenie w urządzeniu, zabawę i edukację.

Dzięki swojej prostocie FOTELIK „KONIK” jest urządzeniem niezwykle cennym przy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych, szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, a prawidłowo wykorzystany może przyczynić się do znacznej poprawy jakości życia dzieci.



4. Specyfikacje techniczne FOTELIKA „KONIK”

FOTELIK „KONIK” dostępny jest w dwóch rozmiarach:

Parametr	Rozmiar 1	Rozmiar 2
Waga (max)	25 kg	45 kg
Długość tułowia (od krętaża większego do czubka głowy)	45-55	50-70
Długość uda (od krętaża większego do kolana)	17-32	20-45
Długość podudzia (od kolan do stopy)	15-28	20-35
Szerokość bioder	14-21	18-38
Szerokość klatki piersiowej	14-21	18-38

5. Standardowe wyposażenie każdego FOTELIKA „KONIK”:

- stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce - 1
- zagłówek - 2
- poduszka podpory ramion - 3
- poduszka oparcia pleców - 4
- pas piersiowy - 5
- poduszki podtrzymujące klatkę piersiową - 6
- pas biodrowy - 7
- poduszki podtrzymujące biodra - 8
- siedzisko - 9
- stabilizator kolan z tapicerką - 10
- podłokietniki - 11
- podnóżek ze stopkami - 12
- stolik - 13

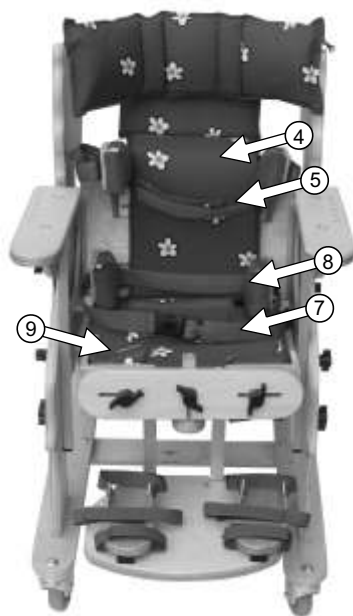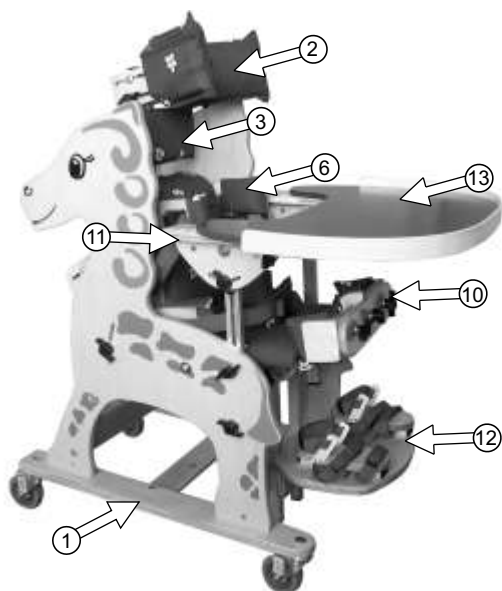

6. Środki bezpieczeństwa

1. FOTELIK „KONIK” należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
2. Przed każdym użyciem FOTELIKA należy:
 - upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
 - sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane,
 - sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
 - sprawdzić działanie hamulców i kół,
 - upewnić się, że ruchome części są stabilne i zablokowane
 - zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm.
3. Urządzenia nie wolno szarpać, ciągnąć po podłożu, przewracać, szczególnie jeżeli w środku znajduje się pacjent.
4. Nie należy używać FOTELIKA jeśli nie ma w pobliżu przeszkolonego członka rodziny lub kogoś uprawnionego do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
5. Nigdy nie należy używać FOTELIKA na niepewnym gruncie, schodach lub stromych pochyłościach, a także zostawiać go na pochyłej nawierzchni.
6. Nie należy używać urządzenia jeśli jest uszkodzone lub brakuje jakiejś części.
7. FOTELIK należy przechowywać z dala od źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury.

UWAGA!!!

Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem firmy (tel. 017/ 85 00 978)

AKCES-MED Sp. z o.o. sprzedaje urządzenie sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp. FOTELIK „KONIK” objęty jest 12. miesięczną gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia w następujących przypadkach:

- w wyniku obsługi FOTELIKA przez niewykwalifikowany personel
- użytkowanie FOTELIKA podczas nieobecności wykwalifikowanego personelu
- nieprawidłowe zamontowanie części i akcesoriów
- samodzielne modyfikowanie części
- użycie nieoryginalnych części i akcesoriów
- naprawę w nieautoryzowanych zakładach serwisowych
- naturalne ścieranie i zużywanie się części (tapicerka, kółka itp.)
- uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem (dotyczy nieodpowiedniego obciążenia i doboru rozmiaru FOTELIKA do danego pacjenta)
- uszkodzenia spowodowane działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych
- uszkodzenia tapicerki wskutek zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych do jego konserwacji
- nie przestrzeganie instrukcji konserwacji
- niezastosowanie się do zasad zawartych w niniejszej instrukcji

OSTRZEŻENIA:

- należy zachować szczególną ostrożność przy rozpakowaniu urządzenia (rozcinanie opakowania), aby nie uszkodzić tapicerki
- montaż FOTELIKA dokonuje osoba do tego uprawniona (sprzedawca, dealer) lub personel medyczny odpowiednio do tego przeszkolony
- FOTELIK „KONIK” jest sprzętem indywidualnego użytkowania
- FOTELIK „KONIK” powinien być obsługiwany przez osoby do tego uprawnione takie jak: rehabilitanci, lekarze rehabilitacji i wykwalifikowany personel po uprzednim przeszkoleniu
- FOTELIK „KONIK” może być używany zarówno na oddziałach rehabilitacji, jak również w domu pacjenta wyłącznie w obecności odpowiednio przeszkolonych osób

Informacje dodatkowe

- czyszczenie FOTELIKA powinno odbywać się zgodnie z instrukcją „Konserwacja i czyszczenie” (strona 12)
- w razie wystąpienia jakiegokolwiek wypadku lub uszkodzenia, należy skontaktować się z dealerm u którego zakupiono produkt

7. Podstawowe zasady dopasowania FOTELIKA do użytkownika

Dopasowania FOTELIKA do pacjenta dokonuje wyłącznie personel odpowiednio do tego przeszkolony.

Dziecko siedząc w FOTELIKU musi stale znajdować się pod kontrolą odpowiednio przeszkolonych osób.


FOTELIK „KONIK” jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta, w związku z tym przy zakupie należy zwrócić uwagę na parametry (ROZMIAR 1, 2) podane na stronie 4. Regulacji i dopasowania zawsze dokonuje autoryzowany serwisant-terapeuta. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy małego pacjenta.

REGULACJA ZAGŁÓWKA

Do regulacji wysokości zagłówka służą nakrętki A, należy je poluzować, ustawić wysokość wg potrzeb i dokręcić nakrętki.

Zagłówek można ustawiać pod kątem, bądź przesuwać do przodu lub do tyłu używając nakrętek B.


Szerokość zagłówka ustawia się pokrętkami, które umieszczone są wewnątrz pokrowca. Należy je poluzować, ustawić właściwą szerokość i dokręcić.

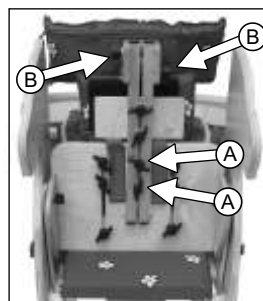

PODPORA RAMION

Aby ustawić podporę ramion należy poluzować nakrętki C, znajdujące się z tyłu fotelika i przesunąć podporę do żądanej pozycji, a następnie dokręcić nakrętki.


W przypadku używania fotelika przez małe dzieci podpora ramion i jej nakrętki mogą być zdjęte.

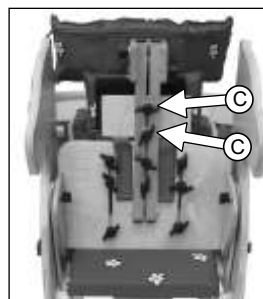

PODUSZKI WSPIERAJĄCE KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA


Aby ustawić szerokość i wysokość poduszek podtrzymujących klatkę piersiową należy poluzować nakrętki D (znajdujące się z tyłu fotelika), dopasować poduszki do klatki piersiowej dziecka i dokręcić śruby.

Podobnie reguluje się położenie poduszek biodrowych wykorzystując nakrętki E.

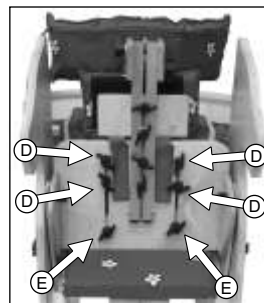


PAS PIERSIOWY I PAS BIODROWY

Długość pasów reguluje się za pomocą sprzączek. Należy zwrócić uwagę, aby poduszczyki znajdujące się na pasach podtrzymywały dziecko na środku klatki piersiowej i bioder.

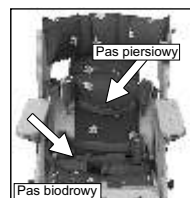

KĄT OPARCIA PLECÓW


Do regulacji kąta oparcia pleców wykorzystuje się pokrętła F.

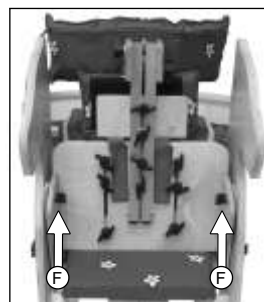

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZENIA



Aby zmienić głębokość siedzenia należy poluzować nakrętki G (znajdujące się pod siedziskiem), ustawić pożądaną głębokość siedzenia (poprzez wyciągnięcie siedzenia do przodu lub wepchnięcie do tyłu) i dokręcić nakrętki.

Bardzo małe dzieci mogą siedzieć w foteliku z wyprostowanymi nogami. Wówczas należy ustawić największą głębokość siedzenia.

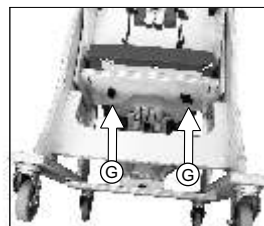


PODNOŻEK

Do regulacji wysokości podnóżka należy użyć pokręteł H. Kąt nachylenia podnóżka ustawia się pokrętłami I.

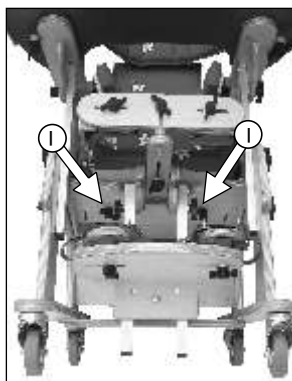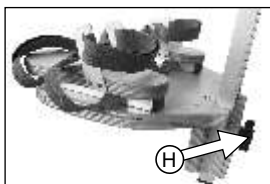

STOPKI

Pozycję stopek na płycie podnóżka reguluje się przy pomocy pokręteł J. Stopki można przesuwając do przodu, do tyłu oraz regulować kąt ich ustawienia.

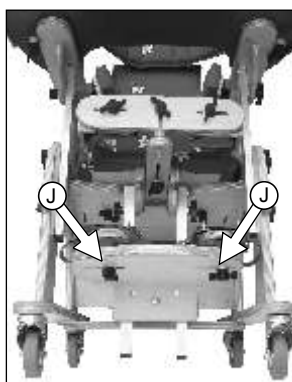


STABILIZATORY KOLAN

Poluzowując nakrętkę K możemy dokonać zmiany położenia stabilizatora kolan oraz ustawić właściwą siłę nacisku na kolana. Nakrętki L poluzowane umożliwiają podparcie kolan z zewnątrz lub (po odwróceniu podpory kolanowej) od wewnątrz. Nakrętka Ł pozwala zmienić wysokość na jakiej znajduje się podpora.

UWAGA!


Przed posadzeniem lub wyjęciem dziecka z fotelika rehabilitacyjnego KONIK, zawsze należy zdjąć stabilizatory kolan.

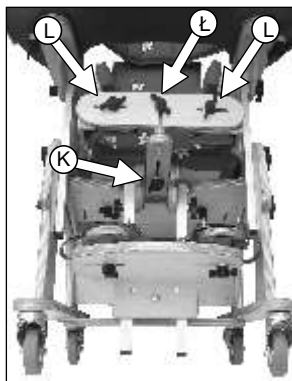

REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA NACHYLENIA PODŁOKIETNIKA


Do regulacji wysokości należy wykorzystać dwie nakrętki M.

Kąt pochylenia podłokietnika ustawia się poluzowując nakrętkę N.

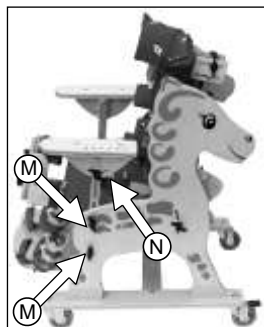


ODCHYLENIE FOTELIKA

Dwa pokrętki O umożliwiają odchylenie fotelika (max 25 stopni) i zmianę pozycji dziecka, bez zmiany jego postawy podczas siedzenia.

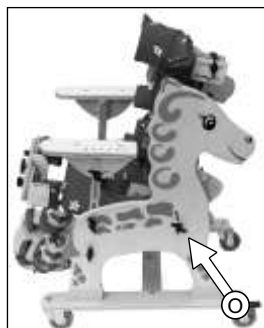

STOLIK

W wyposażeniu standardowym fotelika "KONIK" znajduje się stolik montowany do podłokietników. Montażu stolika dokonujemy przez wprowadzenie bolców umieszczonych w dolnej części blatu stolika w otwory znajdujące się w podłokietnikach. Pokrętła P blokują blat stolika przed przesuwaniem.

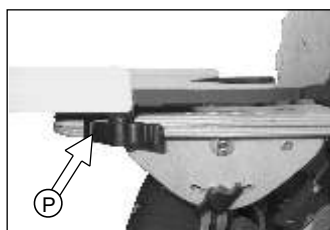

UWAGA!

Przed posadzeniem małego pacjenta w foteliku należy upewnić się, że wszystkie pokrętki są mocno dokręcone!

Przed zmianą jakichkolwiek ustawień, dziecko należy zapiąć w pasy bezpieczeństwa.

Konserwacja i czyszczenie fotelika "KONIK"

Fotelik "KONIK" - jako indywidualny środek zaopatrzenia ortopedycznego, będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu.

Cykliczne czyszczenie i konserwacja fotelika "KONIK" są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Konserwacja konstrukcji i części tapicerowanych

- należy upewnić się czy części drewniane nie mają drzazg, czy nie odłamały się fragmenty konstrukcji lub nie występują oznaki zmęczenia materiału
- należy sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby i nakrętki są dobrze skręcone i żadnej nie brakuje
- należy sprawdzić pasy bezpieczeństwa, czy nie są postrzępione, a sprzączki działają prawidłowo
- należy zwrócić uwagę na uszkodzenia stolika manipulacyjnego (chropowatość, ostre narożniki, uszkodzenia lakieru, czystość)
- niewielkie zabrudzenia konstrukcji drewnianej można usunąć przy pomocy zwilżonej gąbeczki; konstrukcję po skończonym czyszczeniu należy wytrzeć do sucha
- w przypadku zabrudzenia tapicerki plamy należy usunąć tak szybko jak to jest tylko możliwe; plam nie należy ścierać, lecz osuszyć papierowym ręcznikiem, chłonną czystą szmatką lub chusteczką. Plamę należy delikatnie usuwać szmatką nasączoną roztworem słabego detergentu i letniej wody, „opukując” plamę od zewnątrz do środka. Użycie zbyt mokrej szmatki może spowodować powiększenie plamy, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu. Czynność należy powtarzać, aż do całkowitego usunięcia plamy pamiętając o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia. Po wywabieniu plamy, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody i czystej białej szmatki.

Tkaniny nie należy zamaczać!

Zabrania się używać rozpuszczalników organicznych lub środków do prania chemicznego.

Przed ponownym użyciem fotelika, tapicerka zawsze musi być sucha!

Konserwacja kółek

Zalecane jest co najmniej raz w miesiącu czyszczenie kółek z włosów, brudu, kurzu itp.

Unosząc podstawę należy sprawdzić czy koła są prawidłowo dokręcone, nie zniszczone, czy hamulec zatrzymuje obracające się koło.

Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie fotelika spoczywa na Producencie.

Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować fotelika podczas używania go przez pacjenta.

Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu.

W razie potrzeby wymiany części lub serwisowania wyrobu, należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy AKCES-MED (tel. 017 85-00-978).



PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Akces-MED Sp. z o.o.
ul. Leszka Czarnego 3
35-615 Rzeszów
tel. 017 85 00 978

[http:// www.akces-med.com](http://www.akces-med.com)
e-mail: akces-med@akces-med.com

Autoryzowany Dealer

1

AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.